

Instruções de uso

Formulário de coleta Triagem Neonatal / EIM

1 Identificação do cliente




Use apenas uma etiqueta por formulário de coleta. Isso facilita sua identificação no sistema.

2 Dados do paciente




Preencha todos os campos do formulário de forma legível. Isso agiliza a liberação dos resultados.

3 Solicitação do exame



Marque um grupo de exames e/ou faça uma solicitação individual de doenças.

4 Suspeita clínica de EIM



Preencha o verso do formulário em caso de suspeita clínica de Erro Inato do Metabolismo (EIM).

5 Utilização do filtro para coleta




Não destaque o protetor do papel filtro. Coloque-o para trás e realize a coleta.

6 Coleta e secagem



Deixe secar o papel filtro por pelo menos 3 horas após a coleta conforme imagem acima.

7 Múltiplas amostras simultâneas

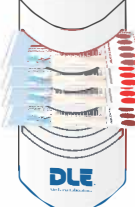

Utilize o suporte de secagem para grandes quantidades de papel filtro.

8 Protocolo



Destaque e guarde o protocolo até receber o resultado.

9 Envio da amostra



Após a secagem, cubra o filtro com o protetor, insira-o na parte de trás do formulário de coleta e lacre-o.