


1 Preenchimento

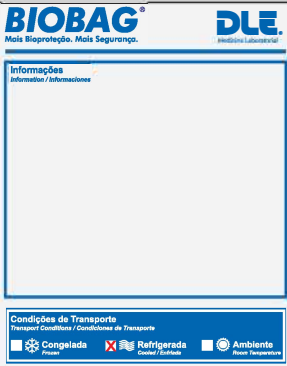

BIOBAG® Mais Bioproteção. Mais Segurança.
DLE Medicina Laboratorial

Informações
Information / Informaciones


Condições de Transporte
Preserver Conditions / Condiciones de Transporte

Congelada Refrigerada Ambiente

Assinale a Condição de Transporte das amostras.

O campo de Informações é dedicado para a inclusão de dados adicionais sobre as amostras em caso de necessidade.

2 Armazenamento

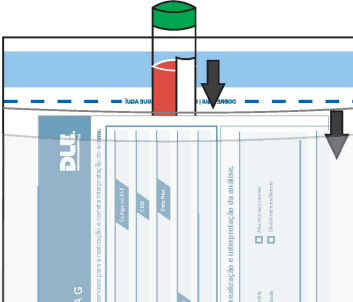

Acondicione as amostras no BIOBAG®.

Deposite as requisições na bolsa externa, evitando contato com as amostras.

CAPACIDADE

BIOTUBOS® e tubos - até 20 unidades.

Frascos padronizados de urina e fezes - até 4 unidades.

OBSERVAÇÕES

- Não adicione no mesmo BIOBAG® amostras com temperaturas diferentes;
- Não coloque gelo ou gelo seco dentro do BIOBAG® junto com as amostras;
- Coloque as requisições na área destinada, sendo ela a bolsa externa do BIOBAG®;
- O BIOBAG® possui um lacre de segurança que, após fechado, não pode ser aberto novamente, garantindo a integridade do material acondicionado;
- O BIOBAG® não deve ser reutilizado. Descarte-o em lixo infectante;
- Para solicitar o BIOBAG® entre em nosso site (dle.com.br) e acesse "Solicitação de Material" ou entre em contato com o nosso Canal do Cliente.