



INSTRUÇÕES DE USO

1. NÃO coma, beba, fume ou faça higiene bucal nos 30 minutos anteriores a coleta.
2. Separe todas as partes e monte o suporte de secagem (amarelo) antes de iniciar a coleta.
3. Cole a Etiqueta A no formulário Requisição.
4. Esfregue a bochecha suavemente por 10 vezes. Repita no lado oposto. Evite esfregar os dentes.
5. Cole a Etiqueta B na haste do swab.
6. Deixe secar por pelo menos 4h em temperatura ambiente utilizando o suporte de secagem (amarelo).
7. Insira o swab no envelope 01 (branco) e lacre.
8. Insira o envelope 01 no envelope 02 (azul) e lacre.
9. Insira o envelope 02 no envelope de proteção e lacre.
10. Coloque o envelope de proteção e a requisição na embalagem retornável para envio ao DLE.

